




## OMEZENÁ ZÁRUKA


Společnost St. Jude Medical, Inc. (SJM) zaručuje, že výroba tohoto zdravotnického prostředku byla věnována dostatečná péče. TATO ZÁRUKA NAHRAZUJE VŠECHNY OSTATNÍ ZÁRUKY, A TYTO SOUČASNĚ VYLUČUJE, POKUD NEJSOU VÝSLOVNĚ UVEDENY V TOMTO DOKUMENTU, LHOSTEJNO ZDA EXPLICITNĚ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ PRÁVEM NEBO JINAK, VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, JAKÝCHKOLI IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, protože manipulace s tímto zdravotnickým prostředkem, jeho skladování, čištění a sterilizace, jakož i faktory související s pacientem, diagnózou, léčbou, chirurgickými zákroky a dalšími záležitostmi, které jsou mimo dosah kontroly společnosti SJM, mají přímý vliv na tento zdravotnický prostředek a výsledky dosažené jeho použitím. SPOLEČNOST SJM NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NAHODILÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POŠKOZENÍ NEBO NÁKLADY vzniklé přímo nebo nepřímo z použití tohoto zdravotnického prostředku, které by měly za následek něco jiného, než náhradu celého zdravotnického prostředku nebo jeho částí. Společnost SJM nepřebírá jakoukoli další nebo dodatečnou odpovědnost v souvislosti s tímto zdravotnickým prostředkem a uvedenou odpovědností nepověřuje žádnou jinou osobu.

Některé státy ve Spojených státech amerických nepovolují omezení délky trvání implikované záruky, takže se výše uvedená omezení na Vás nemusí vztahovat. Tato omezená záruka Vám dává určitá zákonná práva a je možné, že máte další práva, která se v rámci jednotlivých jurisdikcí liší.


Popisy referenčních rozměrů uvedené v dokumentech publikovaných společností SJM jsou určeny pouze k obecnému popisu zdravotnického prostředku v době jeho výroby a nejsou podkladem žádné výslovné záruky.

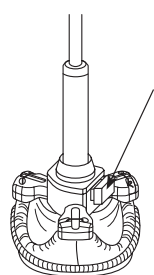


Obrázek 8: Uvolněte rukojeť držáku chlopně stisknutím tlačítka.

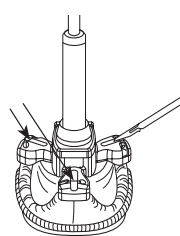

Obrázek 9: Odstříhnete tři stehy a uvolníte držák aortální chlopně.

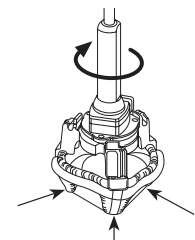


Obrázek 10: Otočte rukojeť držáku chlopně, aby se mitrální stent odklonil dovnitř.

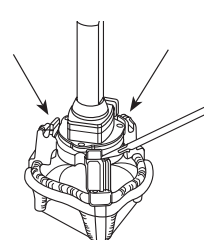


Obrázek 11: Odstříhnete tři stehy a uvolníte držák aortální chlopně.

Tabulka 1: Popis čísla modelu a referenční rozměry


Číslo modelu	Průměr tkáňového anulu (mm)	Aortální/komorová protruze (mm)	Celková výška (mm)	Vnější průměr manžety (mm)
<b>Aortální chlopně Biocor/Epic</b>				
B100-21A/ E100-21A	21	9	14	25
B100-23A/ E100-23A	23	9	15	27
B100-25A/ E100-25A	25	10	16	29
B100-27A/ E100-27A	27	11	17	31
B100-29A/ E100-29A	29	12	19	33
<b>Aortální chlopně Epic Supra</b>				
ESP100-19	19	11	14	25
ESP100-21	21	11	15	28
ESP100-23	23	13	16	29
ESP100-25	25	13	17	31
ESP100-27	27	14	19	33
ESP100-29	29	15	20	35
<b>Mitrální chlopně Biocor/Epic</b>				
B100-25M/ E100-25M	25	9	16	33
B100-27M/ E100-27M	27	9	17	35
B100-29M/ E100-29M	29	10	19	37
B100-31M/ E100-31M	31	10	20	39
B100-33M/ E100-33M	33	11	20	41

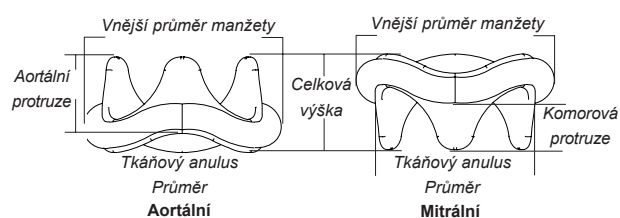

Obrázek 1: Chlopně Biocor a Epic

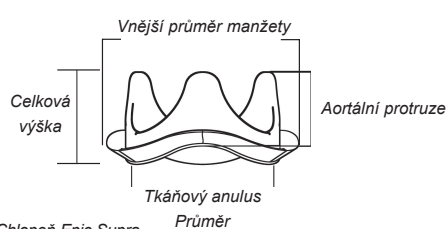


Obrázek 2: Chlopně Epic Supra

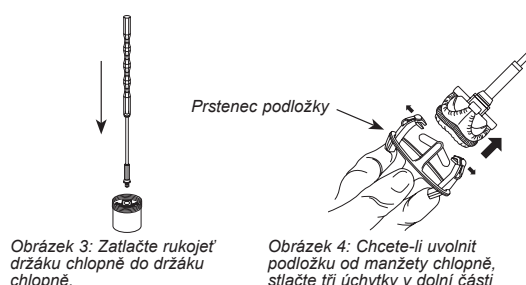

Obrázek 3: Zatlačte rukojeť držáku chlopně do držáku chlopně.

Obrázek 4: Chcete-li uvolnit podložku od manžety chlopně, stlačte tři úchytky v dolní části podložky chlopně pod prstencem podložky.

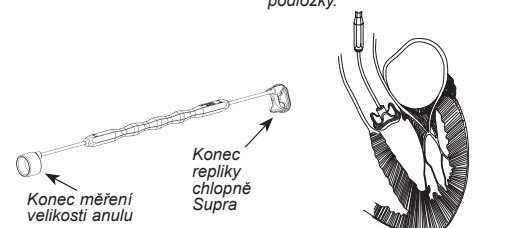

Obrázek 5: Aortální měřka B1000

Obrázek 6: Do supraanulárního prostoru vložte konec se supra replikou chlopně, abyste ověřili uložení a správnou pozici chlopně Epic Supra.



Obrázek 7: Měřka mitrální chlopně B1000

**ST. JUDE MEDICAL**

**Výrobce:**  
St. Jude Medical, Inc.  
One Lillehei Plaza  
St. Paul, Minnesota 55117 USA

**Výrobní zařízení:**  
St. Jude Medical Brasil Ltda.  
Rua da Paisagem, 310B  
Vila da Serra

Nova Lima – MG  
CEP 34.000-000, Brazílie  
**Zákaznický servis/Oddělení technické podpory:**  
Telefon: +1 800 544-1664 – bezplatná linka v USA  
+1 651 490-4410  
Fax: +1 651 481-7702

Číslo patentu v USA 5,746,775; číslo patentu v Brazílii 8402134-9; očekávané zahraniční patenty.

Biocor, Epic, FlexFit, Linx, ST. JUDE MEDICAL, SJM, a upravené SJM jsou obchodními známkami společnosti St. Jude Medical, Inc. nebo jejích poboček.  
Copyright 2007 St. Jude Medical, Inc. Všechna práva vyhrazena.

**CE**  
0 4 8 2

**Rx only**